

# STOLELØFTEREN



# Stoleløfteren

*At håndtere tunge løft og forflytninger skal kunne udføres uden at belaste og nedslide kroppen, netop derfor har vi udviklet "Stoleløfteren" et hjælpemiddel der ikke bare skåner kroppen, men også møbler og gulv.*

Den nuværende løsning på at forflytte en stol til og fra spisebordet er at påskruer små hjul på stolen, man kan så vippe, skubbe og mase stolen til og fra bordet. Denne løsning er dog langt fra hensigtsmæssig, udover at man belaster kroppen unødigt meget er løsningen dyr og besværlig, hjulene skal monteres på alle stole, de skal regelmæssigt efterspændes, stolene går fra hinanden og skal ofte limes og til sidst udskiftes – en på alle måder dyr løsning – vælg i stedet "Stoleløfteren"



Vi har udviklet stoleløfteren med det for øje, at den skal være nem, sikker og enkel at bruge.

Den er derfor elektrisk højdeindstillelig, der er ingen besværlige tilpasninger og justeringer før et løft.

Den tomme stol kan sættes tilpas væk fra bordet, hermed er der god plads til både brugeren og en eventuel rollator.



Når brugeren har sat sig, køres stoleløfteren nemt og enkelt ind under stolen.

Stoleløfteren er udført med store hjul på midten, den kan dermed dreje om sin egen akse, hvilket gør det ekstra nemt og skånsomt at køre, dreje og placere stolen/brugeren.

Det kræver et minimum af kræfter og du skåner din ryg og led.



Det elektriske løft gør det nemt at løfte og sænke stolen.

Stoleløfteren løfter hele 200kg og mere 300 end gange op og ned pr. opladning.

Udover at det indbyggede ligestillings-beslag gør, at stolen altid løftes vandret op og ned, sikre det også, at man uanset stolens udformning slipper for manuel tilpasning og justering.



Brugeren placeres præcis hvor det ønskes.

Stoleløfteren sænkes og køres til siden for parkering.

På grund af dens lille størrelse kan stoleløfteren parkeres i umiddelbar nærhed af bordet, den er dermed nemt tilgængelig og klar når brugeren igen skal rejse sig fra bordet.



For brugere som har brug for ekstra hjælp til at rejse sig, kan man i de fleste tilfælde (lidt afhængig af stoletype og brugers samarbejdsevne) med fordel udnytte stoleløfterens vippe funktion som oprejsnings-hjælp.

Stoleløfterens forreste hjul bremses.



Stoleløfteren hæves, brugerens fødder skal forsat have kontakt med gulvet.

I takt med at brugeren læner sig fremover vipper stolens bagende og hjælper dermed brugeren til en nemmere og mere sikker oprejsning.

Stoleløfterens vippe-beslag låser stolen, der er altså ingen risiko for, at stolen utilsigtet vipper tilbage.

## Tilbehør



Har man behov for regelmæssigt at veje en bruger/beboer har vi udviklet en digitalvægt for montering direkte på Stoleløfteren.

Udover at man undgår at investere i en separat stolevægt, undgår man også besværet med at løfte og forflytte brugeren over på stolevægten.

Med denne digitalvægt monteret på stoleløfteren, løfter man blot brugeren siddende i stolen, man har forinden



nulstillet vægten med stolen på og man kan nu aflæse brugerens vægt i displayet.

Med denne vægt er det nemt og ubesværet at følge med i en brugers vægt fra dag til dag.

Vægt og stoleløftere kan bestilles samlet men vægten kan også bestilles separat for senere montering.

# Brugsanvisning



Kør stoleløfteren hen bag stolen, kør op så løftegaflerne er lige under stolens bagkant.

Kør nu frem så løftegaflerne er forbi stolens forkant. Tryk på op knappen og løft – stolen skal kun lige løftes fri af gulvet. Uanset stolens udformning søger et indbygget ligestillings beslag for, at stolen altid løftes vandret op og ned.

Når forflytningen er færdig trykkes på ned knappen og løftegaflerne sænkes, sænk tilstrækkeligt til at løftegaflerne går fri af stolens bagkant. Træk Stoleløfteren fri af stolen.



Husk at nulstille ligestillings beslaget efter hvert løft!

Dette gøres som vist ved et let løft med foden eller ved at køre Stoleløfteren helt i bund.

Stoleløfteren løfter ca. 300 gange på en opladning. Det anbefales at sætte stoleløfteren til ladning hver nat. Dette gøres som vist ved at sætte laderens stik i håndkontrollen. Lampen på laderen vil lyse gult, når batterierne er fuldt opladet vil lampen lyse grøn.

## Teknisk specifikation

### Dimensioner:

990 x 630 x 400mm

### Produkt vægt:

29kg

### Batteri:

2 stk. 2,9Ah-12V

### Batterilader:

Input 100-250V  
Output 24V 0,5 A

### Patenter:

Sakse løft, 03015918.0/1384697

### Registreringer:

Ligestillingsbeslag, BA 2007 00141

### Løfthastighed:

600mm/min.

### Løfte interval:

29cm til 59cm

### Motor:

Type LA 31—120

### Håndkontrol:

Type HB 41

### Max belastning:

200kg

### Artikel nr.:

205070

### HMI nr.:

46980



Lyngbyvej 32 ■ 2100 København Ø ■ Telefon 3920 2007  
www.johlhumancare.dk ■ info@johlhumancare.dk